


结肠直肠肿瘤的早期诊断及预防筛检

粪便潜血

样本采集说明

器具包括一个带塞子的小瓶(试管)和一个塑料封套。

- 1- 在一个清洁和干爽的环境中（如塑料或是铝制）盛载大便样本。
- 2- 拧开绿色的塞子并抽出小杆，小心不要倒掉容器中的液体，它用于保存样本。
- 3- 用小杆头在大便上 3 或 4 个不同之处掠过。
- 4- 只收集留在小杆头的大便样本。多余的大便没用，也不能用于化验。
- 5- 把小杆插入到试管中，盖好塞子直至它卡嗒一声固定好，然后摇匀。液体要保持尽可能透明，且流动性要好。
- 6- 将小瓶放入专用的塑料封套中，把它们保存在冰箱中直至交付检查；应尽快送交，最多 2 天之内。

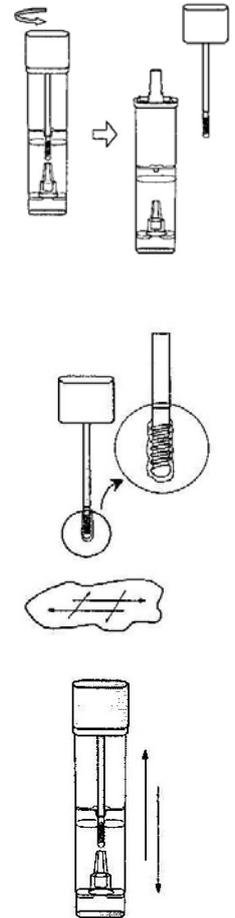

**ENTRO AL MASSIMO DUE GIORNI DALLA RACCOLTA, IL CAMPIONE ANDRA' POSTO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE REFRIGERATO SITO PRESSO**

从采集样本之日算起最多 2 天之内，应将样本送交位于

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

的冷藏容器内

重要事项

- 1- 收集大便样本之前，不需要特别注意饮食。
  - 2- 在月经期或是痔疮出血期间，不要做此化验。
  - 3- 避免尿液污染大便。
  - 4- 小心不要弄脏了小瓶的外面和贴有条形码的标签。
  - 5- 请勿用酒精擦洗试管和标签。
  - 6- 请勿损坏试管底部的铝薄膜。
- 诊断用试管：禁止吞服液体，应置于儿童触及不到之处。

从送交日期算起的 6 个月之内使用试管，否则，请致电筛检中心索取新的试管